

## IDEXX VetTest Chemistry Analyzer 獸醫專用生化分析儀操作流程表

### Slide Bar Code Failure

#### 條碼判讀失敗

發生原因：

1. 條碼列印不清楚
2. 條碼油印太亮

掃讀試劑片條碼時，螢幕先顯示：

Empty used slide container  
when ready: Press E

- 先把廢片盒內使用過的試劑片倒掉。
- 再按“E”

然後螢幕會再顯示：

#### Slide Bar code failure

Note the chemistry and curve number on the slide and reload slide

解決操作步驟：

- 把退出的試劑片從廢片盒拿出來，記錄試劑片上印的項目和校正曲線代號。
- 把此試劑片再推回 VT8008 內。
- VT8008 會再馬上去掃讀條碼。螢幕顯示生化項目的代號和以下訊息：

ALB 9 .....	(白蛋白 代號 9)
ALK 65 .....	(鹼性磷酸酶 代號 65)
ALT 62 .....	(丙胺酸轉胺酶 代號 62)
Enter chemistry code number for the slide inserted and press E: (輸入已推入的試劑片上的代號，再按 E)	
Use C to correct entry. (修改輸入資料，按 C)	

→ (例如是 ALT, 其代號就是 62) 輸入 62, 然後按 E

Enter curve number for the current slide and press E: (輸入目前試劑片上校正曲線代號再按 E)	
Use C to correct entry. (修改輸入資料，按 C)	

→ (例如是 16) 輸入 16, 然後按 E

## IDEXX VetTest Chemistry Analyzer 獸醫專用生化分析儀操作流程表

### Slide Bar Code Failure

#### 條碼判讀失敗

螢幕會再顯示你輸入的資料

Chemistry: ALT (生化項目: ALT)

Curve number: 16 (校正曲代號碼:16)

Press E if correct (如果正確按 E)

Press C to redo (如果要重輸按 C)

→ 按 E

Machine Reading barcodes

儀器會再判讀其他試劑片

Equip Probe (裝備分注器)

Remove Probe (拿出分注器)

Insert new tip on probe (把新的滴管裝到分注器上)

Push tip on firmly (推入滴管到分注器上)

Replace probe (把分注器放回原位)

When ready: press E (操作完按 E)

→ 裝上滴管後把分注器放回原位, 再按 E

↓ 以下檢體吸取就照正常操作執行